



# OPTICELL®

Fibra gelificante con quitosano

## USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad
- » Cualquier nivel de exudado
- » Como apósito primario

## APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » Optifoam® Gentle
- » Bordered Gauze
- » Stratasorb® Composite

## INDICACIONES

- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras por insuficiencia venosa
- » Lesiones por presión
- » Quemaduras de primer y segundo grado
- » Úlceras de pie diabético
- » Heridas quirúrgicas
- » Heridas por traumatismos
- » Zonas donantes
- » Úlceras arteriales y úlceras en la pierna de origen mixto
- » Heridas oncológicas


## FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Opticell® puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » Opticell puede dejarse en su sitio hasta 14 días en el contexto del tratamiento de quemaduras
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

## CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Personas sensibles al quitosano, que se obtiene de los mariscos

## RESULTADOS DE MEMORIA DE SUPERFICIE CORPORAL (MSC)<sup>1</sup>

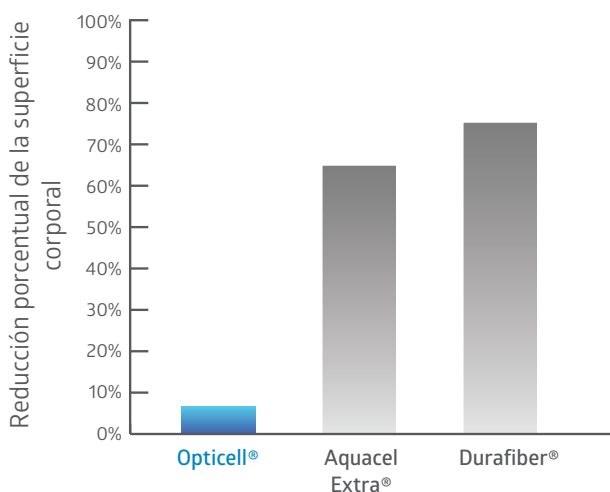

Conserva su forma y tamaño para mantener cubierta toda la herida<sup>1</sup>.



## ACERCA DE OPTICELL

- » Tecnología de fibra gelificante Chytoform™
- » Alta capacidad de amoldamiento
- » Versátil: puede usarse con cualquier nivel de exudado
- » Tres veces más resistente que el Aquacel convencional<sup>1</sup>
- » El fluido no se difunde en sentido lateral, lo cual reduce la maceración
- » Gran capacidad de absorción<sup>1</sup>
- » Mantiene un entorno húmedo para la curación de la herida
- » Memoria de superficie corporal (MSC): conserva su tamaño
- » Se quita suavemente de la herida
- » Controla hemorragias menores
- » Diseñado para reducir al mínimo el dolor al quitarse



Tecnología de fibra gelificante con quitosano

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.  
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

### LÁMINAS DE FIBRA GELIFICANTE OPTICELL

Ideales para heridas de espesor parcial y total con cualquier nivel de exudado.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC7822EP	5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.)	A6196	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC7844EP	10.8 x 10.8 cm (4.25 x 4.25 pulg.)	A6197	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC7866EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.)	A6197	5/caja, 10 cajas/cartón




### CUERDA DE FIBRA GELIFICANTE OPTICELL

Ideal para rellenar heridas con cualquier nivel de exudado.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC7818EP	1.9 x 45.7 cm (0.75 x 18 pulg.)	A6199	5/caja, 10 cajas/cartón



### RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ABSORCIÓN<sup>1</sup>

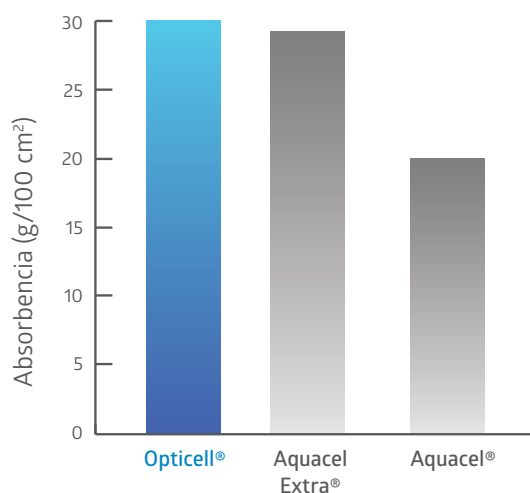

Opticell ofrece las mejores capacidades de absorción de su clase<sup>1</sup>.

Referencias bibliográficas

1. Datos de pruebas de laboratorio archivados.

# ¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN CLÍNICA?

[medline.com/advancedwoundcare](http://medline.com/advancedwoundcare)



**Medline Industries, Inc.** Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093

Medline Estados Unidos  
1-800-MEDLINE (633-5463)  
[medline.com](http://medline.com) | [info@medline.com](mailto:info@medline.com)

Medline México  
01-800-831-0898  
[medlinemexico.com](http://medlinemexico.com) | [mexico@medline.com](mailto:mexico@medline.com)

SÍGANOS



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE HCPCS: Los códigos HCPCS y los códigos de facturación consolidados de cuidados domiciliarios ofrecidos por Medline tienen el propósito exclusivo de servir como pautas generales.

Medline no garantiza la cobertura o el reembolso de ningún producto. El cliente deberá dirigir todas las cuestiones sobre cobertura y reembolso (incluida la exactitud y validez de los códigos) a sus propios pagadores. El cliente deberá responsabilizarse de garantizar la exactitud e idoneidad de cada reclamación que presente, de conformidad con todos los requisitos vigentes del pagador.

Puede que algunos productos no estén disponibles en todos los países. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en este folleto.

© 2016 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. MKT1779412 / LIT049ESLA / 2.5M / AL / 30