



OPTIFOAM® Ag+

Apósitos de espuma antimicrobianos

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad*
- » Heridas con exudado de leve a moderado
- » Apósito primario o secundario

*Como apósito secundario

**Únicamente los apósitos sin borde requieren un apósito secundario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS**

- » Cinta adhesiva Medfix™
- » Cinta adhesiva Gentac™
- » Venda tubular Medigrip™



INDICACIONES

- » Lesiones por presión
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Heridas quirúrgicas
- » Heridas con colonización
- » Ideal para el manejo de la contaminación bacteriana en heridas postoperatorias
- » Úlceras en la pierna
- » Úlceras de pie diabético
- » Zonas donantes
- » Laceraciones y abrasiones
- » Desgarros de la piel
- » Quemaduras de primer y segundo grado
- » Debajo de vendas compresivas

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Optifoam Ag+ puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Lesiones con vasculitis activa
- » Personas con sensibilidad confirmada a la plata

ACERCA DE OPTIFOAM Ag+

- » La plata iónica actúa como una barrera antimicrobiana¹
- » Protección antimicrobiana continua¹
- » Absorbente¹
- » Amoldable¹
- » Puede manejar la introducción reiterada de bacterias
- » No mancha
- » La tasa de transmisión del vapor de agua se ajusta al nivel del fluido
- » Ayuda a crear un entorno ideal para la curación
- » Capa exterior impermeable
- » Capa exterior de bajo cizallamiento y fricción

Referencias bibliográficas
1. Datos archivados.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
 Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

OPTIFOAM Ag+ ADHESIVE

Para heridas con piel perilesional íntegra.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC9604EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.), Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC9606EP	Sacro: 15.2 x 14.2 cm (6 x 5.5 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón




OPTIFOAM Ag+ NON-ADHESIVE

Para heridas con piel perilesional frágil.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC9614EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6209	10/caja, 10 cajas/cartón



Exposición de 4 cm² de cada apósito durante 4 h a 37 °C
 Población inicial: 10⁶ - 10⁷ unidades formadoras de colonias (UFC)

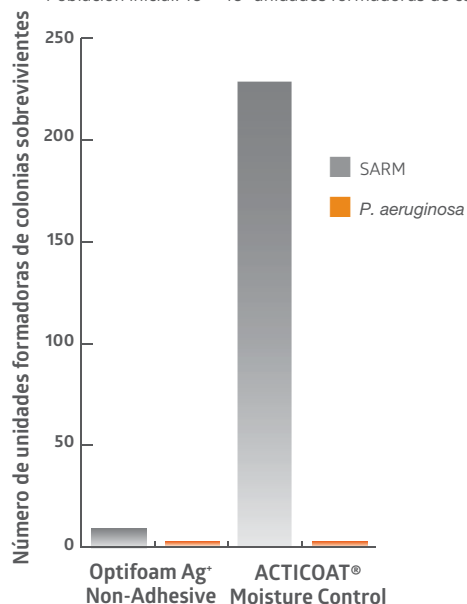

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EFECTO ANTIMICROBIANO¹

Optifoam Ag+ produce el mínimo número de unidades formadoras de colonias sobrevivientes al cabo de 4 horas.

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN CLÍNICA?

medline.com/advancedwoundcare



Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093

Medline Estados Unidos
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline México
01-800-831-0898
medlinemexico.com | mexico@medline.com

SÍGANOS



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE HCPCS: Los códigos HCPCS y los códigos de facturación consolidados de cuidados domiciliarios ofrecidos por Medline tienen el propósito exclusivo de servir como pautas generales. Medline no garantiza la cobertura o el reembolso de ningún producto. El cliente deberá dirigir todas las cuestiones sobre cobertura y reembolso (incluida la exactitud y validez de los códigos) a sus propios pagadores. El cliente deberá responsabilizarse de garantizar la exactitud e idoneidad de cada reclamación que presente, de conformidad con todos los requisitos vigentes del pagador.

Puede que algunos productos no estén disponibles en todos los países. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en este folleto.
© 2016 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. MKT1779412 / LIT049ESLA / 2.5M / AL / 30