



OPTIFOAM® GENTLE Ag+

Apósitos antimicrobianos de espuma de silicona

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad*
- » Heridas con cualquier nivel de exudado
- » Como apósito primario o secundario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS**

- » Cinta adhesiva Gentac™
- » Red elástica
- » Venda tubular Medigrip™

*Puede usarse como apósito secundario para heridas profundas

**Únicamente los apósitos sin borde requieren un apósito secundario



INDICACIONES

- » Lesiones por presión
- » Heridas de espesor parcial y superficiales de espesor total
- » Heridas quirúrgicas
- » Heridas con colonización
- » Úlceras en la pierna
- » Úlceras de pie diabético
- » Zonas donantes
- » Laceraciones y abrasiones
- » Desgarros de la piel
- » Quemaduras de primer y segundo grado

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Optifoam Gentle Ag+ puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Lesiones con vasculitis activa
- » Personas con sensibilidad confirmada a la plata

ACERCA DE OPTIFOAM GENTLE Ag+

- » Apósito siliconizado que se adhiere suavemente
- » Alta capacidad de amoldamiento¹
- » La tasa de transmisión del vapor de agua se ajusta al nivel del fluido
- » La plata iónica actúa como una barrera antimicrobiana¹
- » Protección continua con barrera antimicrobiana¹
- » Ayuda a mantener un entorno húmedo para la curación de la herida
- » Capa exterior impermeable
- » Gran capacidad de absorción¹
- » No mancha
- » Capa exterior de bajo cizallamiento y fricción

Referencias bibliográficas
1. Datos archivados.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

OPTIFOAM GENTLE Ag+ CARA Y BORDE EN SILICONA

Ideal para el manejo de heridas con contaminación bacteriana. El núcleo superabsorbente absorbe, atrapa y aleja el exudado, y el diseño de cinco capas mejora el rendimiento.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC9644EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.), Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC9666EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.), Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.)	A6213	10/caja, 10 cajas/cartón



OPTIFOAM GENTLE Ag+ ESPUMA CON CARA EN SILICONA – SIN BORDE

Ideal para una adhesión suave y el manejo de la contaminación bacteriana en las heridas. La cara en silicona ayuda en la colocación del apósito; la suave espuma amoldable puede recortarse a la medida.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC9544EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6209	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC9566EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.)	A6210	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC9588EP	20.3 x 20.3 cm (8 x 8 pulg.)		10/caja, 10 cajas/cartón



OPTIFOAM GENTLE AG+ ESPUMA CON BORDE EN SILICONA

Ideal para heridas con contaminación bacteriana y exudado de leve a moderado. Bordes de bajo perfil que aumentan la capacidad de amoldamiento.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC9744EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.), Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC9766EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.), Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.)	A6213	10/caja, 10 cajas/cartón



¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN CLÍNICA?

medline.com/advancedwoundcare



Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093

Medline Estados Unidos
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline México
01-800-831-0898
medlinemexico.com | mexico@medline.com

SÍGANOS



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE HCPCS: Los códigos HCPCS y los códigos de facturación consolidados de cuidados domiciliarios ofrecidos por Medline tienen el propósito exclusivo de servir como pautas generales. Medline no garantiza la cobertura o el reembolso de ningún producto. El cliente deberá dirigir todas las cuestiones sobre cobertura y reembolso (incluida la exactitud y validez de los códigos) a sus propios pagadores. El cliente deberá responsabilizarse de garantizar la exactitud e idoneidad de cada reclamación que presente, de conformidad con todos los requisitos vigentes del pagador.

Puede que algunos productos no estén disponibles en todos los países. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en este folleto.
© 2016 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. MKT1779412 / LIT049ESLA / 2.5M / AL / 30