



VERSATEL® Y VERSATEL ONE

Apósitos de capa de contacto

USOS RECOMENDADOS

- » Para evitar la adhesión del apósito secundario a la herida

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » Stratasorb® Composite
- » Optifoam® Adhesive
- » Maxorb® Extra

INDICACIONES

- » Abrusiones con exudado desde ninguno hasta abundante
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras venosas o lesiones por presión
- » Desgarros de la piel
- » Quemaduras de primer y segundo grado
- » Ampollas, cortaduras y laceraciones
- » Heridas quirúrgicas y por traumatismos

FRECUENCIA DE CAMBIO


- » Versatel puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Personas con sensibilidad confirmada a la silicona
- » No apto para su implantación quirúrgica

Fluido transferido a través de Versatel

Versatel está diseñado para facilitar la transferencia de los fluidos de heridas a un apósito secundario¹.

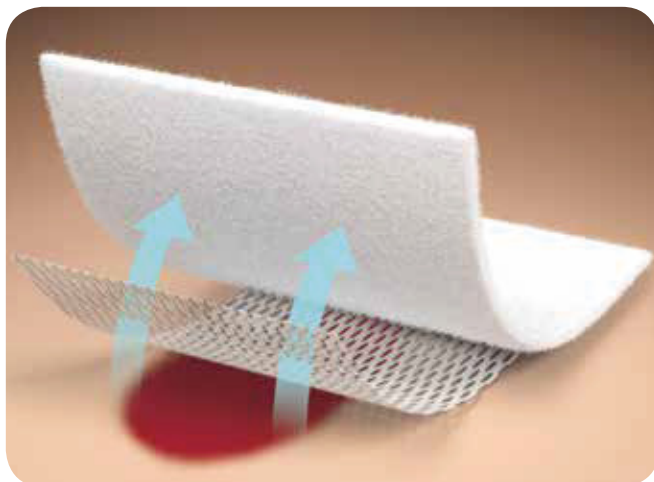

Referencias bibliográficas

1. Pruebas en un laboratorio independiente. Informes de prueba archivados. 2. Mulder GD. Quantifying wound fluids for the clinician and researcher. *Ostomy Wound Manage.* 1994;40(8):66-69. 3. Pruebas en un laboratorio independiente. Informes de prueba archivados.



ACERCA DE VERSATEL

- » Adhesivo atraumático de silicona
- » Flexible y maleable, para adaptarse a las curvas del cuerpo y aumentar la comodidad
- » Versatel One ofrece un contacto de silicona unilateral para facilitar el manejo
- » Reduce los posibles traumatismos por adhesión del apósito secundario a la herida
- » Reduce al mínimo el dolor al quitarse
- » Con canales que facilitan la transferencia de fluido a un apósito absorbente
- » Traslúcido, para facilitar la observación de la herida

Típicamente, una herida con exudado abundante descarga más de 10 ml de fluido al día². En un estudio *in vitro* que simuló el exudado de una herida, se demostró que Versatel constituye una capa de transferencia eficiente del fluido. En promedio, Versatel permitió el paso de 16.2 ml de fluido durante 2.5 horas, lo que equivale a 155.52 ml al día³.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

VERSATEL

Capa de contacto bilateral con silicona.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1723EP	5.1 x 7.6 cm (2 x 3 pulg.)	A6206	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1734EP	7.6 x 10.2 cm (3 x 4 pulg.)	A6206	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1747EP	10.2 x 17.8 cm (4 x 7 pulg.)	A6207	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC17812EP	20.3 x 30.5 cm (8 x 12 pulg.)	A6208	5/caja, 5 cajas/cartón




VERSATEL ONE


Silicona unilateral para mayor facilidad de manejo.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1823EP	5.1 x 7.6 cm (2 x 3 pulg.)	En trámite	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1834EP	7.6 x 10.2 cm (3 x 4 pulg.)	En trámite	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1845EP	10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.)	En trámite	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1847EP	10.2 x 17.8 cm (4 x 7 pulg.)	En trámite	10/caja, 5 cajas/cartón
MSC18812EP	20.3 x 30.5 cm (8 x 12 pulg.)	En trámite	5/caja, 5 cajas/cartón


Instrucciones de aplicación sencillas

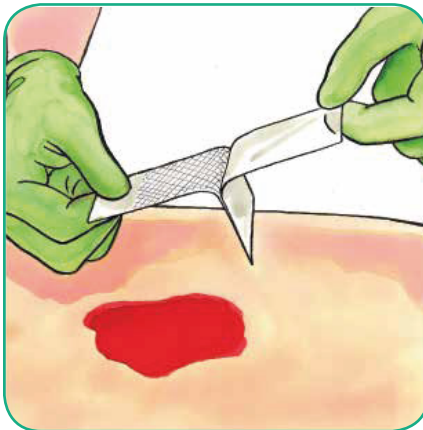

Paso 1: Limpie y seque la herida y la zona perilesional. Extraiga Versatel de su envase. Retire el recubrimiento de uno de los lados del apósito.

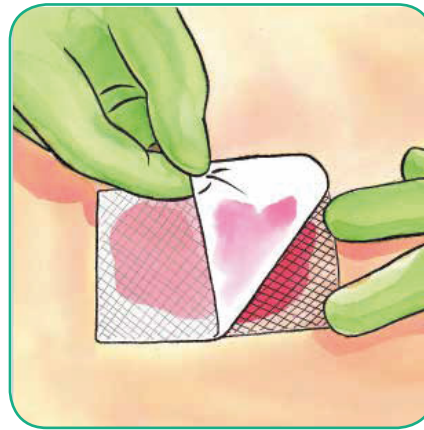

Paso 2: Coloque el apósito directamente sobre la herida y alíselo para fijarlo bien.
NOTA: Versatel puede cubrir la piel perilesional y se puede también recortar, si es necesario.

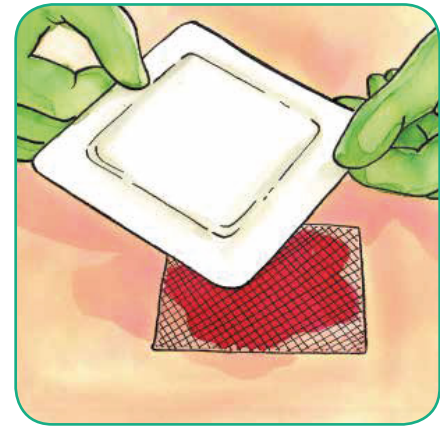

Paso 3: Retire el segundo recubrimiento, si corresponde (únicamente Versatel). Cubra con un apósito secundario absorbente adecuado, como Stratasorb®. Versatel se puede usar bajo apósitos compresivos.

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN CLÍNICA?

medline.com/advancedwoundcare



Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093

Medline Estados Unidos
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline México
01-800-831-0898
medlinemexico.com | mexico@medline.com

SÍGANOS



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE HCPCS: Los códigos HCPCS y los códigos de facturación consolidados de cuidados domiciliarios ofrecidos por Medline tienen el propósito exclusivo de servir como pautas generales. Medline no garantiza la cobertura o el reembolso de ningún producto. El cliente deberá dirigir todas las cuestiones sobre cobertura y reembolso (incluida la exactitud y validez de los códigos) a sus propios pagadores. El cliente deberá responsabilizarse de garantizar la exactitud e idoneidad de cada reclamación que presente, de conformidad con todos los requisitos vigentes del pagador.

Puede que algunos productos no estén disponibles en todos los países. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en este folleto.
© 2016 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. MKT1779412 / LIT049ESLA / 2.5M / AL / 30